

MASKIN ASETTAMINEN

1. PESE KÄTESI SAIPPUALLA JA VEDELLÄ TAI KÄSIDESILLÄ ENNEN MASKIIN KOSKEMISTA.

2. OTA MASKI PAKKAUKSESTA JA VARMISTA, ETTEI SIINÄ OLE REPEÄMIÄ TAI REIKIÄ KUMMALLAKAAN PUOLELLA.

3. TUTKI KUMPI ON MASKIN YLÄREUNA. YLÄREUNASSA ON KOVEMPI MUOTOILTAVA OSA.

4. TUTKI KUMPI ON MASKIN ULKOPUOLI. VÄRILLINEN PUOLI MASKISTA ON ULKOPUOLI JA SE NÄKYYPÄ KASVOILLASI ULOSPÄIN. VALKOINEN PUOLI MASKISTA TULEE KASVOJASI VASTEN.

5. TARTU MASKIN KORVALENKKEIHIN JA ASETA LENKIT MOLEMPIEN KORVIESI TAAKSE.

6. PAINELE MASKIN YLÄOSA TIIVIISTI KASVOJASI VASTEN.

7. VENYTÄ VAROVASTI MASKIN ALAREUNA SUUN JA LEUAN YLI.

8. VARMISTA, ETTÄ MASKIN REUNOJEN JA IHOSI VÄLILLE EI JÄÄ AUKKOJA. MASKIN PITÄISI PYRKIÄ SUUSI SISÄÄN, KUN HENGITÄT VOIMAKKAASTI SISÄÄN.

9. VAIHDA MASKI KUN SE LIKAANTUU TAI KASTUU TAI SINULLE TULEE VAIKEUKSIA HENGITTÄÄ (MAX. 4 TUNTIA SUOSITUS)



MASKIN POISTAMINEN

1. VÄLTÄ KOSKEMASTA MASKIN ETUOSAA, SILLÄ SE VOI OLLA SAASTUNUT. KOSKETA VAIN KORVALENKKEJÄ.

2. TARTU KIINNI KORVALENKEISTÄ JA POISTA MASKI VAROVASTI NOSTAEN.


3. ÄLÄ LASKE KÄYTETTYÄ MASKIA PÖYDÄLLE.

4. ASETA MASKI HALLITUSTI ROSKIKSEEN.

5. PUHDISTA KÄTESI SAIPPUALLA JA VEDELLÄ TAI KÄSIDESILLÄ.

MATERIAALIN SUODATUSTEHO 99 % (EN 1822)
VTT:N TUTKIMUS VTT-CR-00351-20

TYYPPI: KERTAKÄYTTÖINEN SUU-NENÄSUOJUS
ÄLÄ KÄYTÄ JOS KORVALENKIT EIVÄT ENÄÄ KIRISTÄ!
VALMISTUSMAA: KIINA
PAKKAUSMAA: SUOMI
JAKELIJA: ARVOTUOTANTO KY
WWW.FINNMASK.FI

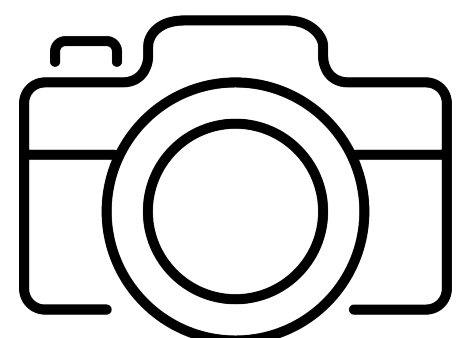

OTA KUVA!

TA PÅ MUNSKYDDET:

1. TVÄTTA HÄNDERNA MED TVÅL OCH VATTEN ELLER MED HANDDESINFEKTION INNAN DU RÖR I MUNSKYDDET.

2. TA UT MUNSKYDDET FRÅN FÖRPACKNINGEN OCH FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET INTE FINNS NÅGRA HÅL ELLER REVOR.

3. FÖRSÄKRA DIG OM VILKEN DEL AV SKYDDET SKA PLACERAS ÖVERST; DEN ÖVRE DELEN HAR EN HÅRD SÖM SOM KAN FORMAS.

4. FÖRSÄKRA DIG OM VILKEN SIDA AV MUNSKYDDET SKA VARA UT OCH IN. DEN YTTRE DELEN AV SKYDDET ÄR FÄRGAT OCH SKALL SYNAS UTÅT. DEN VITA SIDAN AV SKYDDET SKA PLACERAS MOT ANSIKTET.

5. TA TAG I BANDEN OCH PLACERA DEM RUNT ÖRONEN.

6. PLACERA OCH TRYCK DEN ÖVRE DELEN AV MUNSKYDDET TÄTT MOT ANSIKTET.

7. TA I DEN NEDRE DELEN AV MUNSKYDDET OCH DRA NER DEN FÖRSIKTIGT ÖVER MUNNEN OCH HAKAN.

8. FÖRSÄKRA DIG OM ATT DET INTE FINNS ÖPPNINGAR MELLAN HUDEN OCH SKYDDET. NÄR DU ANDAS IN KRAFTIGT SKA DET KÄNNAS SOM OM MUNSKYDDET SUGS IN I MUNNEN.



TA AV MUNSKYDDET:

1. RÖR ENDAST BANDEN. UNDVIK ATT RÖRA MUNSKYDDETS FRAMSIDA DÅ DET KAN VARA KONTAMINERAT.


2. TA TAG I BANDEN OCH LYFT FÖRSIKTIGT BORT MUNSKYDDET FRÅN ANSIKTET.

3. LÄGG INTE DET ANVÄNDA MUNSKYDDET PÅ BORDET.

4. LÄGG VARSAMT MUNSKYDDET I AVFALLSPÅSEN, UTAN ATT BYTA GREPP.

5. RENGÖR DINA HÄNDER MED TVÅL OCH VATTEN ELLER MED HANDDESINFEKTION.

MATERIALENS FILTRERINGSKAPACITET ÄR 99% (EN 1822)
TECHNICAL RESEARCH CENTER LTD VTT-CR-00351-20

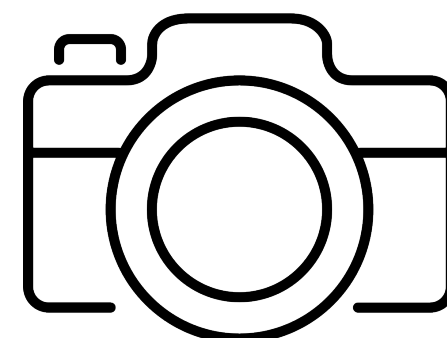

TA EN BILD!

TILLVERKNINGSLAND: KINA
FÖRPACKNINGSLAND: FINLAND
DISTRIBUTÖR: ARVOTUOTANTO KY
WWW.FINNMASK.FI