



**1. TAITA NENÄLÄPÄT SUOJAIMEN
SISÄÄN LISÄÄMÄÄN SUOJAUVUUTTA.**

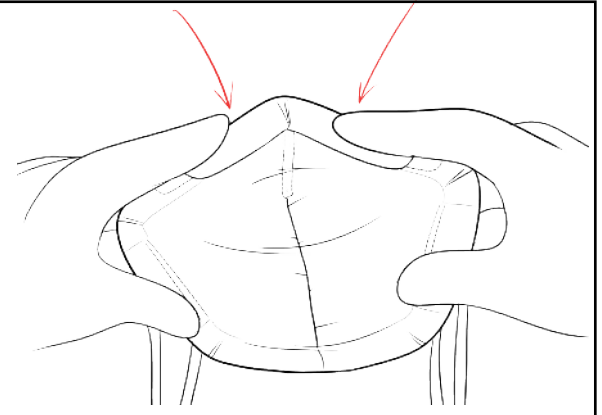

**2. LAITA SUOJAIN KUVAN MUKAISESTI
KASVOILLESII JA ASETA KIINNITYSNAU-
HAT PÄÄN TAAKSE.**



**3. PAINALE SUOJAIMEN
YLÄOSA TIIVIISTI KASVOJASII
VASTEN NENÄN MOLEMMILTA
PUOLILTA PAINAMALLA.**

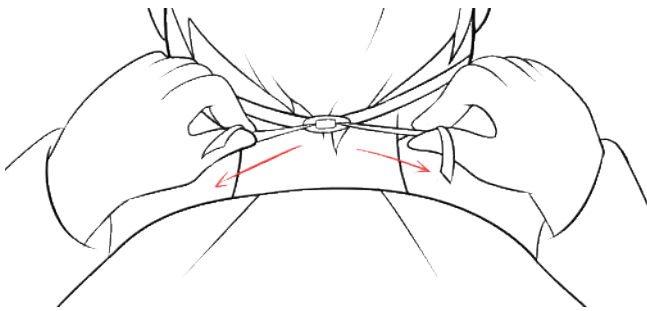


**4. KIRISTÄ LOPUKSII
KIINNITYSNAUHAET VETÄMÄLLÄ
MOLEMMISTÄ PÄISTÄ
VASTAKKAISIIN SUUNTIIN.**

LAITA SUOJAIN KÄYTÖN JÄLKEEN SEKÄJÄTTEESEEN. PESE KÄDET.

TYYPPI: KERTAKÄYTTÖINEN FFP3-HENGITYKSENSUOJAIN
SUODATUSKYKY: 99,6 % (VTT-CR-00461-20), VASTAA FFP3-LUOKITUSTA
KÄYTTÖAIKA: 8 TUNTIA (VAIHDA UUTEEN JOS LIKAANTUU TAI HENGITYS VAIKEUTUU)
VALMISTUSMAA: KIINA
TYYPPI TARKASTUS: DEKRA TESTING AND CERTIFICATION GMBH (3417001.11QT-CPA)
+49.234.3696-400, DTC-CERTIFICATION-BODY@DEKRA.COM
MAAHANTUOJA: ARVOTUOTANTO KY
ISONKIVENTIE 19 F, 04250 KERAVA
WWW.FINNMASK.FI


1. VIK NÄSFLIKARNA MOT INSIDAN AV SKYDDET SÅ ATT DET SKYDDAR BÄTTRE

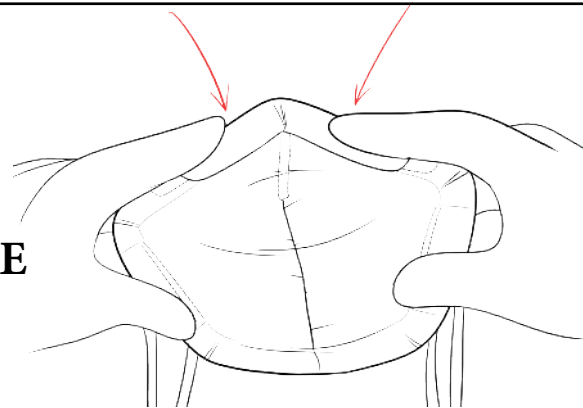

2. PLACERA SKYDDET ENLIGT BILD-BESKRIVNINGEN OCH PLACERA FÄSTBANDEN BAKOM HUVUDET.



3. TRYCK LÄTT PÅ SKYDDETS ÖVRE DEL SÅ ATT DEN SITTER TÄTT MOT ANSIKTET PÅ BÅDA SIDORNA AV NÄSAN.

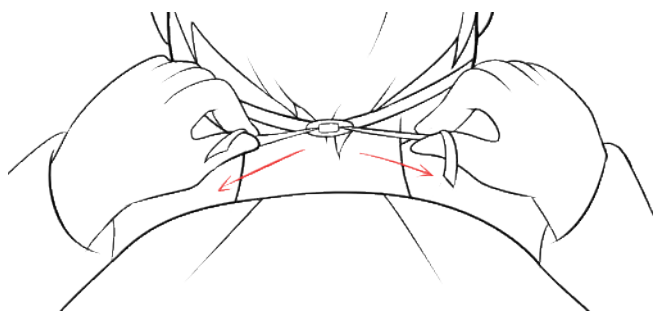

4. SPÄNN SLUTLIGEN FÄSTBANDEN GENOM ATT DRA I BANDEN MOT MOTSATTA RIKTNINGAR.

LÄGG SKYDDET I BLANDAUFALL EFTER ANVÄNDNING. TVÄTTA HÄNDERNA

TYP: FFP3-MUNSKYDD FÖR ENGÅNGSANVÄNDNING
FILTRATIONSKAPACITET: 99,6 % (VTT-CR-00461-20), MÖTER FFP3-KLASSIFIKATION
ANVÄNDNINGSTID: 8 TIMMAR (BYT OM DEN BLIR SMUTSIG ELLER ANDNINGEN FÖRSVÅRAS)
TILLVERKNINGSLAND: KINA
TYPKONTROLL: DEKRA TESTING AND CERTIFICATION GMBH (3417001.11QT-CPA)
+49.234.3696-400, DTC-CERTIFICATION-BODY@DEKRA.COM
IMPORTÖR: ARVOTUOTANTO KY
ISONKIVENTIE 19 F, 04250 KERAVA
WWW.FINNMASK.FI